



# SET 830-S

## Short Guide



## Gratulerar till ditt nya trådlösa Set 830 S från Sennheiser!

Den här snabbguiden är tänkt att underlätta för dig, när du ska börja använda ditt nya trådlösa set för TV.

Packa upp all utrustning och lägg den framför dig. Förpackningen ska innehålla en röd och svart sändare/laddningsenhet (med ett integrerat fack för laddning av extrabatteri på ena sidan), en rund portabel mottagare (som kan fästas på dina kläder eller bäras runt halsen), diverse adaptrar, anslutningskablar etc., en bärrem (lanyard) och till sist en induktionsslinga för att användas med hörapparat. Kontrollera för säkerhets skull listan i den bifogade handboken "*Wireless Infrared TV Listening System Set 830 S*" sidan 4 "*Delivery includes*".

Exponera inte utrustningen (sändaren och mottagaren) för direkt solljus. Solljuset kan störa den infraröda mottagningen och generera störningar.

### 1. Anslut Set 830 S till ett vägguttag

- Till att börja med, montera ihop nätadaptern. Välj en passande kontakt som används för vägguttag i ditt land. Tryck fast den i den lilla svarta boxen som heter: "SWITCHING POWER SUPPLY NT-13" tills den låser fast (med ett hörbart klick). Nu är nätadaptern färdig.
- Anslut adaptern till ett vägguttag och - i andra änden av sladden - anslut den lilla, gula, runda kontakten till den gula uttaget på baksidan av sändaren med markeringen "DC IN 13,5V".
- Sändaren är nu påslagen och en grön lampa tänds på framsidan. Om inte sändaren används inom 3 minuter kommer sändaren, och den gröna lampan, att åter stängas av .

### 2. Ladda mottagaren

- Placera den runda mottagaren i laddningsfacket ovanpå sändaren. Om den placeras på rätt sätt kommer laddningsblecken att få full kontakt, batterierna kommer att laddas och en röd lampa - alldeles under Sennheiser-logotypen på sändaren - kommer att tändas.
- Första gången måste mottagaren laddas ungefär 3 timmar. När batterierna är fulladdade skiftar lampans färg från rött till grönt. Nu kan man använda mottagaren ca 12 timmar innan den behöver laddas på nytt. För säkerhets skull bör mottagaren alltid förvaras i laddningsfacket ovanpå sändaren när den inte används, för att du ska vara säker på att den alltid är fulladdad när du behöver den. Det är inte möjligt att överladda batterierna.

### 3. Koppla Set 830 till din TV eller en annan ljudkälla

- Detta kan göras på olika sätt, men kom alltid ihåg att stänga av TV:n eller ljudkällan innan anslutning sker.
- Koppla den ena änden av ljudkabeln med blå minitelekontakter till hörlursuttaget på din TV. Den andra änden av kabeln kopplas till baksidan av sändaren, till det blå uttaget med beteckningen "AUDIO".
- Om TV-uttaget är för stort bör du använda den större stereotele-adaptren. Den lilla kontakten stoppas in i bakre delen av den större kontakten.
- Sändaren kan även anslutas på annat sätt, till exempel genom att använda phono-kontakter eller SCART-kontakten (oftast placerad på baksidan av TV:n), det är dock ofta enklast att använda TV:ns hörlursuttag.
- En liten omkopplare på sändarens baksida markerad med "ST/MO" (stereo eller mono) erbjuder ett stereoalternativ. Set 830 S måste i så fall vara kopplad till en stereo-TV och omkopplaren måste vara i ST-läget (mot den blå Audio-kontakten). Setet levereras i det läget från fabriken.
- Till sist - på baksidan av sändaren - finns en ratt för att man ska kunna justera balansen mellan bas och diskant, i de fall man använder hörbarhetsförstärkningen (diskanthöjning), som beskrivs nedan. Du behöver en skruvmejsel för att kunna göra denna justering, men normalt är detta inte nödvändigt.
- Sätt på TV:n och vrid upp ljudvolymen till lämplig nivå.


## 5. Att använda Set 830 S systemet – med eller utan induktionsslinga

- Sändaren startas automatiskt så snart TV:n försett den med en signal.
- På mottagarens framsida finns en minitelekontakt, på den övre vänstra sidan. Här kan man ansluta normala hörlurar eller induktionsslingan som ingår i paketet (används tillsammans med hörapparat). Observera att hörapparaten måste ställas i läget "T".
- Mottagaren kan bäras runt halsen, endera i bärremmen eller enbart i induktionsslingan. Båda kan knäppas fast på baksidan av mottagaren när bältesspännet avlägsnats.
- Anslut induktionsslingan eller hörlurar till minitelekontakten.
- Mottagaren måste alltid vara vänd framåt när den används. Volymratten måste kunna "se" sändaren utan att något föremål skymmer den. Mottagaren sätts på genom att man trycker på ON/OFF-knappen i mitten av volymratten. Ifall du nu hör TV-ljudet har mottagaren hittat sändaren och allt är bra. Om så inte är fallet, måste du trycka på CHANNEL-knappen på mottagarens baksida. Den söker då efter sändaren. Kontrollera att TV:n är på och att hörapparaten är ställd i läget "T".
- Ljudnivån kan justeras med volymratten (0-6). Var försiktig när du gör detta så att inte din hand oavsiktligt skymmer ratten och dess infraröda sensor. Det kan nämligen förorsaka tillfälligt ljudbortfall. Försök att undvika detta.
- Om mottagaren inte får någon signal från sändaren kommer du att höra 6 korta ljudsignaler (pip). Kontrollera att sändaren är påslagen, att du är inom sändarens räckvidd och att sladden från TV:n är korrekt ansluten till sändaren.
- 2 längre ljudsignaler innebär att strömmen i det laddningsbara batteriet är på väg att ta slut.
- Vid behov kan man öka hörbarheten genom att använda den svarta knappen på sändaren (fram till på vänster sida). Den har en liten symbol i form av ett öra. Tryck på den knappen upprepade gånger tills ljudet låter bra för dig:
  - 1: Kompression (svaga partier i ljudet förstärks)
  - 2: Diskanthöjning
  - 3: Både kompression och diskanthöjning samtidigt
  - 4: Grundinställning (inget ljus)
- Slutligen justeras balansen mellan höger och vänster kanal med den lilla ratten på mottagarens baksida.

## 6. Stäng av Set 830 S

- Tryck på on/off-knappen i mitten av volymratten i ungefär 1 sekund.
- Sändarens stängs av automatiskt efter 3 minuter, om TV:n stängs av.

Mycket nöje med Sennheiser Set 830 S! Om du behöver mer detaljerade instruktioner, finns de i den bifogade handboken "*Wireless Infrared TV Listening System Set 830 S*".

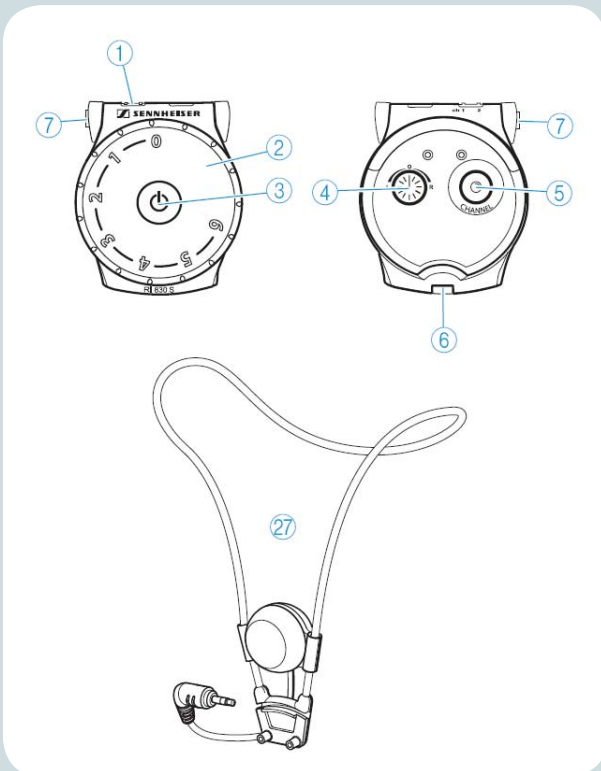

## Mottagare

1. Kanalindikering
2. Volymkontroll
3. On/off-knapp (strömbrytare)
4. Balanskontroll
5. Kanalsökning
6. Batterifack
7. Kontakt för hörlurar, induktionsslinga eller anslutningskabel för hörapparat

## Sändare

8. Laddningsfack för mottagare
9. Laddningsfack för laddningsbart extra-/reservbatteri
10. Laddningsindikering för laddningsbart extra-/reservbatteri
11. Laddningsindikering för mottagarens laddningsbara batteri
12. Spänningsindikering (lyser grönt när sändaren är "på")
13. "Hörbarhets"-knapp
14. Indikering för vald hörbarhetsnivå
15. Kontakt (blå markering) för anslutning av extern ljudkälla eller mikrofon
16. Mono-/stereoomkopplare
17. Diskantkontroll
18. Strömkontakt (DC) (gul markering) för anslutning av nätadapter

